

Thopaz⁺™ Quick Card




Diese Quick Card ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung REF 200.6841 und bezieht sich auf die Firmware 1.01


1. System aufbauen



1. Außenverpackung öffnen
2. Patientenkonnektor im inneren Beutel belassen

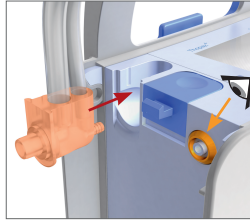

3. Schlauch gerade einsetzen
4. Dichtungsring beachten

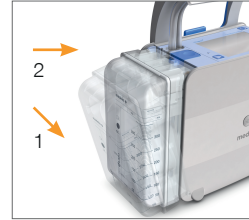

5. Zuerst unteren Teil des Behälters ansetzen
6. Behälter oben einklicken




7. Thopaz+ System ist zusammen gebaut und betriebsbereit

2. Einschalten




1. Thopaz+ einschalten
2. Auswählen, ob ein neuer Patient angeschlossen wurde oder nicht

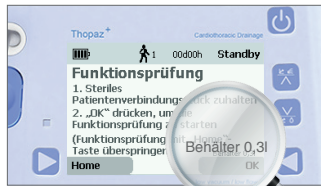


3. Kontrolle der angezeigten Behältergröße (bei falscher Angabe Behälter entsorgen)
4. Thopaz+ ist im Standby-Modus und bereit für die Funktionskontrolle


3. Funktionskontrolle durchführen

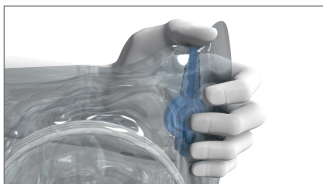

1. Patientenkonnektor verschließen (steril halten)

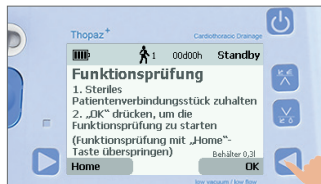


2. „OK“ drücken
Test bestanden: Weiter
Test gescheitert: Anweisungen in der Gebrauchsanweisung REF 200.6841 folgen

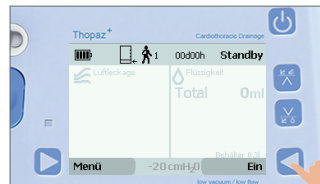


3. Thopaz+ entsprechend krankenhaushausinternen Richtlinien anschließen
4. „Ein“ drücken um Therapie zu starten


4. Druckänderung im laufenden Betrieb

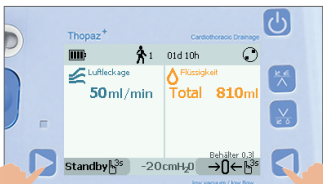

1. Gleichzeitig drücken

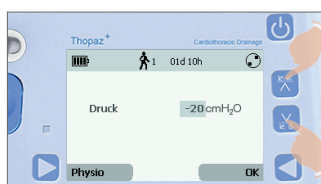


2. Druck ändern

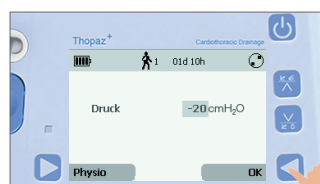


3. Mit „OK“ bestätigen


5. Therapieverlauf kontrollieren

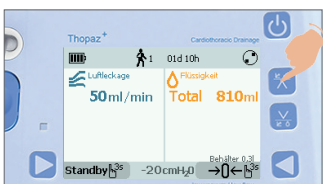


1. Luftleckage kontrollieren

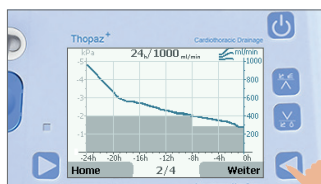

2. Mit „Weiter“ durch die Graphen blättern

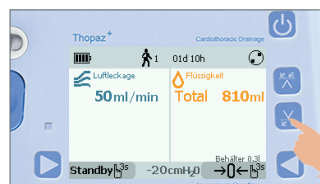

3. Flüssigkeitsverlauf kontrollieren

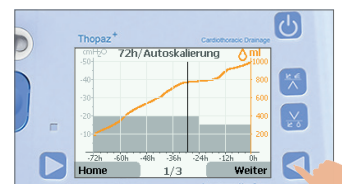

4. Mit „Weiter“ durch die Graphen blättern


6. Flüssigkeitsanzeige zurücksetzen




1. Taste zum Nullen 3 Sekunden lang drücken

2. Timer gibt an, wann der Parameter zuletzt genullt wurde. Durch erneutes Drücken der Taste (3 Sekunden) kann die Anzeige jederzeit bei Bedarf genullt werden.

7. Behälter wechseln

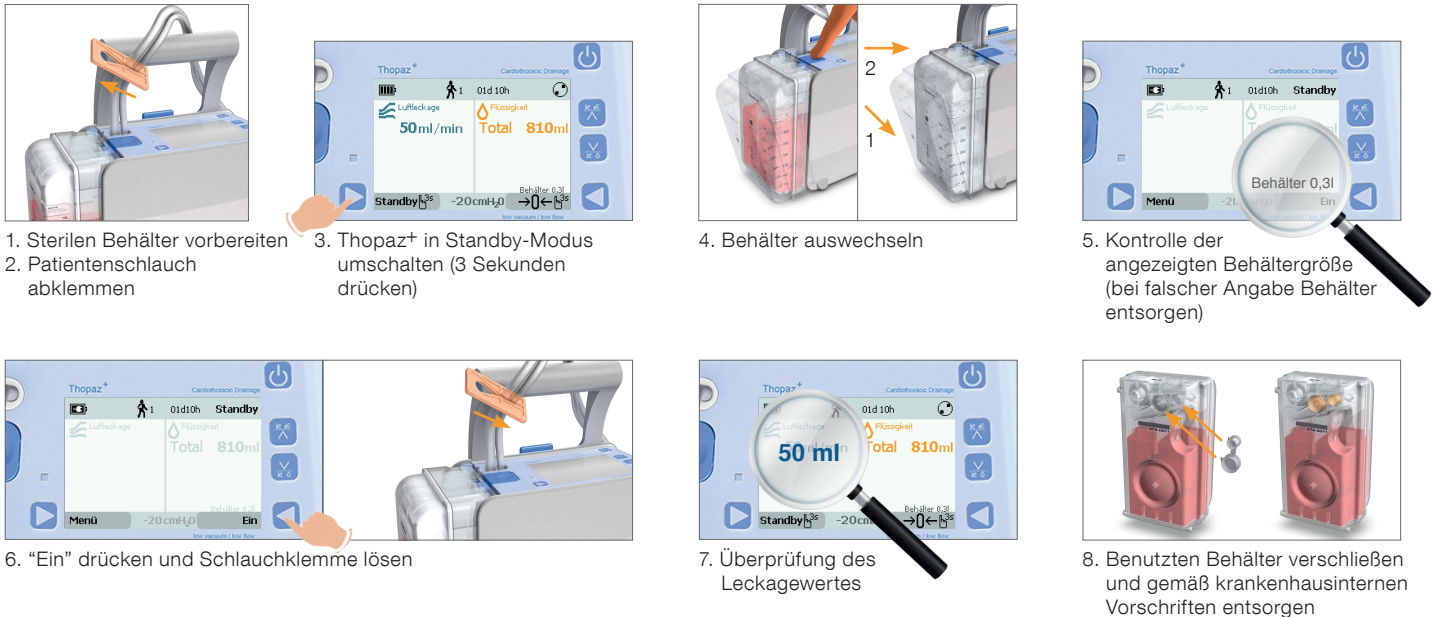


8. Alarme

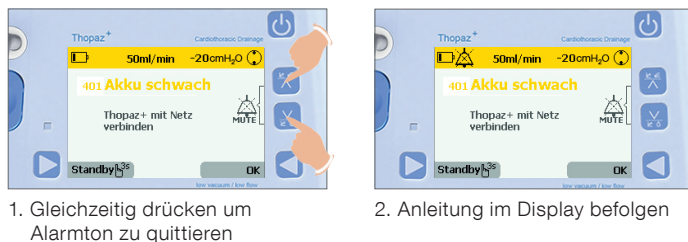

1. Gleichzeitig drücken um Alarmton zu quittieren

2. Anleitung im Display befolgen

10. Thopaz+ ausschalten

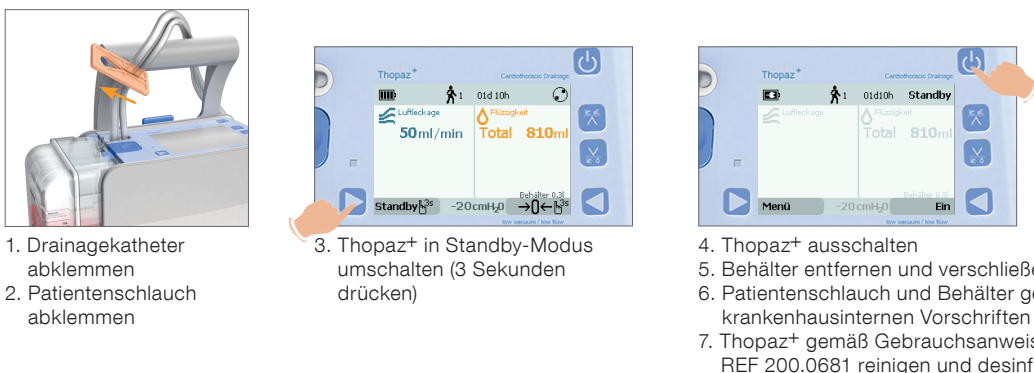


1. Drainagekatheter abklemmen
2. Patientenschlauch abklemmen

3. Thopaz+ in Standby-Modus umschalten (3 Sekunden drücken)

4. Thopaz+ ausschalten
5. Behälter entfernen und verschließen
6. Patientenschlauch und Behälter gemäß krankenhaushinteren Vorschriften entsorgen
7. Thopaz+ gemäß Gebrauchsanweisung REF 200.0681 reinigen und desinfizieren

9. Katheter Prüfung

 Funktioniert nur für Drainagekatheter im interpleuralen Bereich.

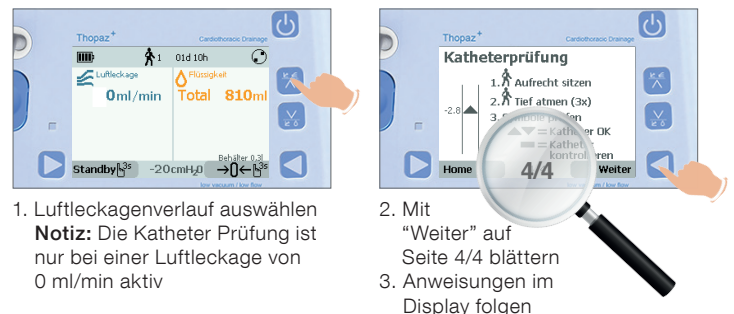

1. Luftleckagenverlauf auswählen
Notiz: Die Katheter Prüfung ist nur bei einer Luftleckage von 0 ml/min aktiv

2. Mit "Weiter" auf Seite 4/4 blättern
3. Anweisungen im Display folgen

